



Chirurgia orale & Implantologia

Il fascino dell'ergo- nomia

Durevole, ergonomico e robusto



NUOVO

I nuovi manipoli e contrangolo
chirurgici di W&H

Perché talvolta si sta un po' stretti



Per la prima volta, i nuovi contrangolo WS-91 e WS-91 L G con testina a 45° uniscono i vantaggi di un manipolo con quelli di un contrangolo. L'inclinazione a 45° consente un accesso e una visione notevolmente migliorati della zona da trattare. Questo aspetto è particolarmente importante durante le estrazioni

chirurgiche dei denti del giudizio, le separazioni dentali e le resezioni di apici radicolari. In questo modo l'accesso palatale ai molari dell'arcata superiore è notevolmente agevolato, anche nei soggetti con apertura orale più piccola. Negli interventi su superfici buccali è disponibile invece più spazio fra la guancia e l'area di

intervento. Allo stesso tempo, la vista è leggermente limitata. Nel rapporto di 1:2,7, lo strumento rotante raggiunge, in base alla velocità dell'unità motrice, fino a 125.000 giri al minuto. Uno spray a tre fori consente un raffreddamento adeguato dello strumento rotante e del dente.

Per tutti gli usi chirurgici

Durevole, ergonomico e robusto. I manipoli e i contrangolo chirurgici di W&H sono stati sviluppati appositamente per la chirurgia orale, stomatologica e facciale e per l'implantologia. Il prezioso acciaio inossidabile, con rivestimento antigraffio, li rende particolarmente robusti.



Lavoro senza affaticamento

La nuova forma ergonomica è perfettamente adatta a tutte le soluzioni di utilizzo e rende meno faticoso il lavoro.



Illuminazione ottimale

Il Mini-LED+ integrato, le cui dimensioni sono la metà rispetto a un LED standard, si trova molto vicino alla punta e offre un'illuminazione ottimale.



Raffreddamento variabile

I clip spray sono posizionabili a sinistra oppure a destra. Di conseguenza, per la prima volta la procedura di raffreddamento può essere adattata alle esigenze individuali.



Superficie antigraffio


Grazie allo speciale rivestimento, il manipolo e il contrangolo sono protetti da eventuali graffi. Quindi, la pulizia è agevolata e il valore dello strumento è preservato nel tempo.



Sistema di serraggio

con esagono di trascinamento

Il sistema di serraggio con esagono di trascinamento sviluppato e brevettato da W&H (UE, USA) garantisce sicurezza operativa alle coppie elevate.

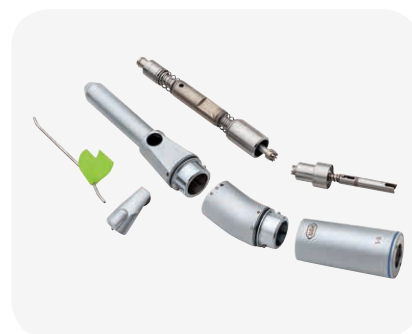

Igiene perfetta

Ai fini di soddisfare gli elevati requisiti di igiene, gli strumenti sono completamente smontabili.

I vantaggi a colpo d'occhio

Eseguire la scansione con il cellulare del codice QR, per ottenere maggiori informazioni su manipoli e contrangolo



Foto simboliche. Accessori e parti aggiuntive illustrati non fanno parte della dotazione.

Manipoli e contrangolo per chirurgia con e senza Mini-LED+

- > Ergonomia ottimale per lavorare senza fatica
- > Longevità e robustezza grazie al prezioso acciaio inossidabile e al rivestimento antigraffio
- > Strumento completamente smontabile per una pulizia profonda
- > Termodisinfettabile e sterilizzabile
- > Assortimento vastissimo per tutti gli usi chirurgici
- > Rapporto di trasmissione: 1:1, 20:1, 1:2, 1:2,7

Con Mini-LED+

- > Qualità diurna della luce durante gli interventi
- > Percezione naturale delle tonalità del rosso
- > Alimentazione indipendente grazie a un generatore integrato
- > Durata maggiore rispetto a lampadine alogene convenzionali



Manipoli per seghe chirurgiche

- > Geometria intelligente delle lame per seghe per una straordinaria efficienza di taglio
- > Un'unica velocità dell'unità motrice per tutti e 3 modelli di seghe
- > Longevità e robustezza grazie al prezioso acciaio inossidabile e al rivestimento antigraffio
- > Für sagittale, oszillierende oder reziproke Bewegung
- > SAssortimento di lame per seghe adeguato a tutti gli usi chirurgici
- > Vibrazioni minimizzate e silenziosità
- > Strumento completamente smontabile per una pulizia profonda
- > Termodisinfettabile e sterilizzabile



Per le informazioni tecniche, consultare la documentazione riepilogativa relativa alla Chirurgia orale & Implantologia.

Produttore:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
5111 Bürmoos, Austria
t +43 6274 6236-0
f +43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

Distribuzione:

W&H Italia S.r.l.
Via Bolgara, 2
24060 Brusaporto (BG), Italia
t +39 035 66 63 911
f +39 035 66 63 939
office.it@wh.com
wh.com

W&H CH-AG
Industriepark 9
8610 Uster, Schweiz
t +41 43 4978484
f +41 43 4978488
info.ch@wh.com
wh.com